



ic LAVAGE

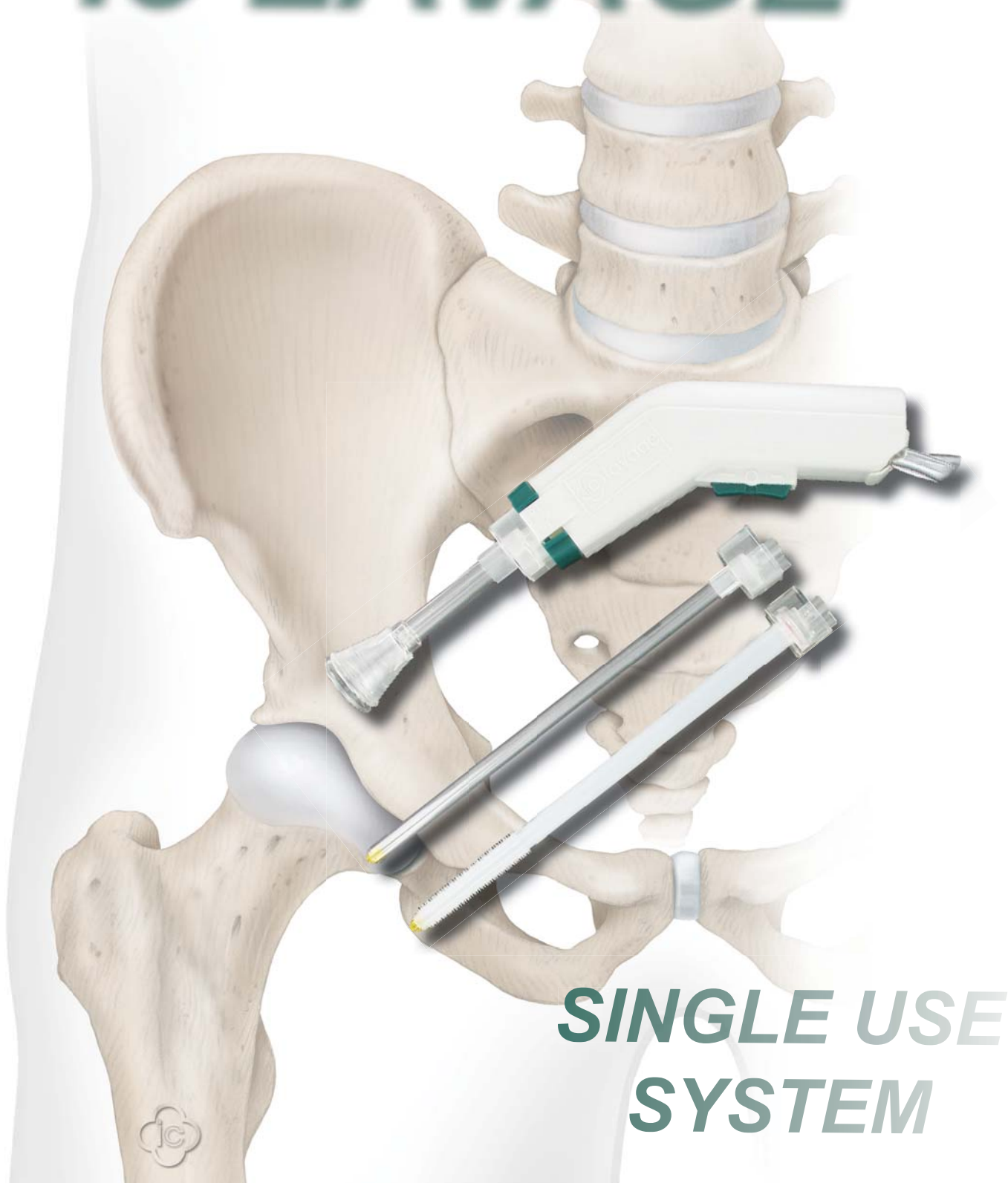

**SINGLE USE
SYSTEM**

Das ic-Lavage System vereint Komfort und Leistung zur schonenden, gründlichen Reinigung und zur Entfernung von losen Knochen, Gewebe - und Blutpartikeln. Gleichzeitig gewährleistet das System eine effiziente Reinigung mit kontrolliertem Druck.

Das Einwegsystem wird in einer doppelt sterilen Blisterverpackung geliefert und beinhaltet ein leichtes Handstück mit zwei Düsen. Es ist batteriebetrieben und hat eine Fingertip-Steuerung, an der zwischen kraftvoller Reinigungsleistung oder einer sanften Spülung für Weichgewebe eingestellt werden kann. Die Durchflussmenge im Schlauch für die Spüllösung und im Abflussschlauch können mit der Klemme (3.1) reguliert werden. Durch gleichzeitiges Saugen und Spülen werden Schmutz und Verunreinigungen gründlich entfernt, ohne Überschwemmungen im Operationsgebiet zu erzeugen.

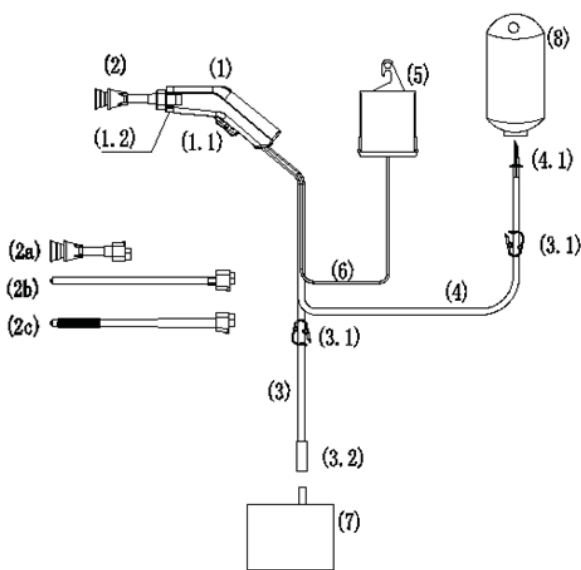

Handgriff (1), bestehend aus:

DC Motor, Druckpumpen, Schalter (1.1), Arretierungsknopf für Düsen (1.2), Verkleidung.

Düse (2), bestehend aus:

kurze Düse mit Spritzschutz (2a), lange Düse ohne Spritzschutz (2b), Femurbürste (lang) (2c).

Ablaufschlauch (3), enthält: Klemme (3.1), Verbindungsschlauch (3.2).

Spülschlauch (4), enthält: Klemme (3.1), Luer-Anschluss (4.1).

Batteriefach (5).

Batterie-Stromkabel (6).

Der OP-Sauger (7) und der Beutel für die Spüllösung (8) sind im Lieferumfang nicht enthalten, sondern werden vom Anwender bereitgestellt.



LEICHTBAUWEISE



SCHLANKES, ERGONOMISCHES DESIGN



BEQUEM IN HANDHABUNG UND NUTZUNG



SICHERER SPITZENSPERRMECHANISMUS



SORGT FÜR EINE SICHERE BEFESTIGUNG DER AUFSÄTZE



FINGERTIP-STEUERUNG




EINFACHE UMSCHALTUNG ZWISCHEN KRAFT VOLLER REINIGUNG UND SANFTER SPÜLUNG

KOMPLETTSET

REF: 00678000 ic Lavage:

Das Komplettsset beinhaltet ein Handstück, eine kurze Düse mit Spritzschuttschild und integrierter Absaugung sowie eine Femurdüse mit Spülung und Absaugung (Verpackungseinheit 10 Stück):

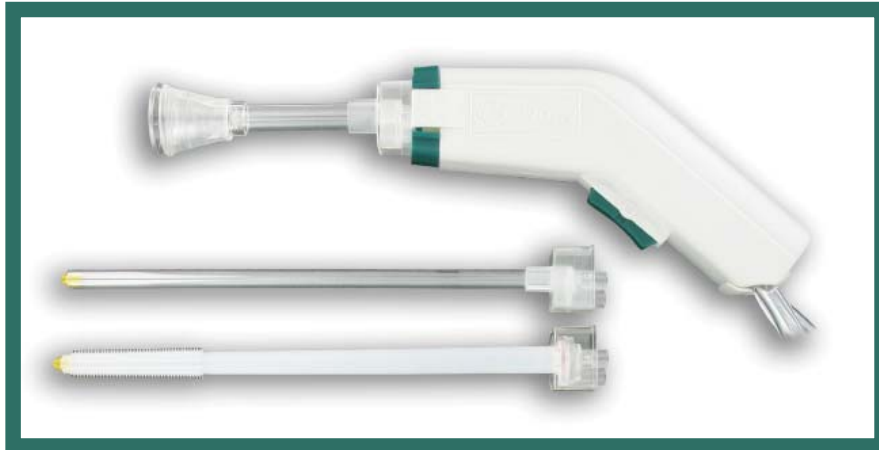

OPTIONALES ZUBEHÖR

REF: 00678002 ic Lavage:

Lange Femurbürste (Abmessung: 13,5mm x 250mm) mit Spülung und Absaugung (Verpackungseinheit 5 Stück).



Das Set ist sofort einsatzbereit. Düse aufstecken, die Anschlussschläuche mit der Spülflüssigkeit und der Absaugung verbinden und den Akku an den Infusionshalter hängen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Gewicht Handstück	< 0,9 kg
Leistung	10 x 1,5 V Batterien
Lautstärke	< 75db (A)
Durchflussmenge	> 0,9 L/min.
Maximale Reichweite	> 2,5 m



implantcast GmbH
Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Deutschland
Tel.: +49 4161 744-0
Fax: +49 4161 744-200
E-mail: info@implantcast.de
Internet: www.implantcast.de

Ihr Vertriebspartner vor Ort:

HERSTELLER:

GUANGZHOU CLEAN MEDICAL PRODUCTS MANUFACTURING CORP.
NO.9 GUANGCONG ROAD
CONGHUA DEVELOPMENT DISTRICT
GUANGZHOU
CHINA
TEL.: +86-20-87654060
FAX.: +86-20-87303882

DISTRIBUTOR:

IMPLANTCAST GMBH
LÜNEBURGER SCHANZE 26
D-21614 BUXTEHUDE
PHONE: +49 4161 744-0
FAX: +49 4161 744-200
E-MAIL: INFO@IMPLANTCAST.DE
INTERNET: WWW.IMPLANTCAST.DE

